

**Instrukcja użytkowania****Bite Rim Stick****【Sposób użycia】**

1. Przyciąć ten produkt na dowolną długość i przykleić do modelu pracy wewnątrzustnej.
2. Przed ułożeniem sztucznych zębów należy umieścić próbną protezę w jamie ustnej pacjenta i ustalić wysokość i położenie zębów.
3. Wykonać protezę woskową zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką.

**【Uwaga】**

1. Podczas spalania tego materiału należy zainstalować lokalny system wyciągowy, wentylator itp. i unikać pracy w zamkniętym pomieszczeniu. Nie wdychać dymu i oparów powstających podczas spalania.
2. Jeśli przed lub w trakcie używania tego materiału dojdzie do zmieszania się jakichkolwiek problemów, takich jak ciała obce, należy zaprzestać jego używania.
3. Podczas używania tego materiału należy uważać, aby się nie poparzyć.

**【Ważna uwaga】**

1. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością, taką jak wysypka lub zapalenie skóry na ten materiał.
2. Użytkownik, który ma wysypkę, zapalenie skóry lub inną nadwrażliwość na ten materiał powinien nosić rękawiczki i unikać bezpośredniego kontaktu z tym materiałem.
3. Pacjenci, u których wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, egzema, zaczerwienienie, owrzodzenie, obrzęk, swędzenie i drętwienie w wyniku stosowania tego materiału, powinni przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
4. Użytkownik, u którego wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, egzema, zaczerwienienie, owrzodzenie, obrzęk, swędzenie lub drętwienie w wyniku stosowania tego materiału, powinien zaprzestać jego stosowania i zasięgnąć porady lekarza.
5. Należy poinformować użytkowników i pacjentów, że wszelkie poważne wypadki z udziałem wyrobu muszą być zgłaszane wytwórcy oraz właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik lub pacjent.

**【Przechowywanie】**

- Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.
- Nie pozostawiać produktu w ciepłym miejscu (np. w pobliżu pieca lub w bezpośrednim świetle słonecznym).
- Miejsce stosowania i magazynowania powinno być wyposażone w system gaśniczy.
- Przechowywać w miejscu, gdzie ogień jest surowo zabroniony i nie przechowywać w dużych ilościach w jednym pomieszczeniu magazynowym.
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych podczas magazynowania i transportu.
- Odpowiednio przechowywać i zarządzać tak, aby dostęp do nich miał tylko upoważniony personel.

**【Data ważności】**

Nie ma określonej daty ważności, ale należy go zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji.

**【Informacje dotyczące utylizacji】**


Pozostałe zapasy muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi krajowymi wymogami prawnymi.

**【Potencjalne zagrożenie】**

Ten produkt może powodować reakcje alergiczne, takie jak wysypka i zapalenie skóry.

**【Wyprodukowane przez:】**

 **YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.**  
54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN  
Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764  
E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;  
Web: www.yamahachi-dental.co.jp

 **OBELIS S.A.**  
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium