

Instrukcja użytkowania**Paraffin Wax****[Sposób użycia]**

1. Płytę z woskiem podgrzewa się płomieniem i w razie potrzeby dociska się ją do modelu, aby stworzyć podstawę protezy.
2. Po umiarkowanym zmięczeniu zwijamy go w rulon, tworząc sztabę.
3. Wosk w kształcie sztabki należy uformować w podkowę i docisnąć do płyty podstawy.
4. Nad i pod części są dodawane lub przycinane, aby ukończyć płytkę zgryzu.
5. Regulacja podstawy protezy zgryzowej, ułożenie sztucznych zębów i wykonanie protezy woskowej odbywa się zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką.

[Uwaga]

1. Podczas spalania tego materiału należy zainstalować lokalny system wyciągowy, wentylator itp. i unikać pracy w zamkniętym pomieszczeniu. Nie wdychać dymu i oparów powstających podczas spalania.
2. Jeśli przed lub w trakcie używania tego materiału dojdzie do zmieszania się jakichkolwiek problemów, takich jak ciała obce, należy zaprzestać jego używania.
3. Podczas używania tego materiału należy uważać, aby się nie poparzyć.

[Ważna uwaga]

1. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością, taką jak wysypka lub zapalenie skóry na ten materiał.
2. Użytkownik, który ma wysypkę, zapalenie skóry lub inną nadwrażliwość na ten materiał powinien nosić rękawiczki i unikać bezpośredniego kontaktu z tym materiałem.
3. Pacjenci, u których wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, egzema, zaczerwienienie, owrzodzenie, obrzęk, swędzenie i drętwienie w wyniku stosowania tego materiału, powinni przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
4. Użytkownik, u którego wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, egzema, zaczerwienienie, owrzodzenie, obrzęk, swędzenie lub drętwienie w wyniku stosowania tego materiału, powinien zaprzestać jego stosowania i zasięgnąć porady lekarza.
5. Należy poinformować użytkowników i pacjentów, że wszelkie poważne wypadki z udziałem wyrobu muszą być zgłaszane wytwórcy oraz właściwym organom państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik lub pacjent.

[Przechowywanie]

- Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.
- Nie pozostawiać produktu w ciepłym miejscu (np. w pobliżu pieca lub w bezpośrednim świetle słonecznym).
- Miejsce stosowania i magazynowania powinno być wyposażone w system gaśniczy.
- Przechowywać w miejscu, gdzie ogień jest surowo zabroniony i nie przechowywać w dużych ilościach w jednym pomieszczeniu magazynowym.
- Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych podczas magazynowania i transportu.
- Odpowiednio przechowywać i zarządzać tak, aby dostęp do nich miał tylko upoważniony personel.

[Data ważności]

Nie ma określonej daty ważności, ale należy go zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji.

[Informacje dotyczące utylizacji]

Pozostałe zapasy muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi krajowymi wymogami prawnymi.

**[Potencjalne zagrożenie]**

Ten produkt może powodować reakcje alergiczne, takie jak wysypka i zapalenie skóry.

**[Wyprodukowane przez:]**

 **YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.**
 54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN
 Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764
 E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;
 Web: www.yamahachi-dental.co.jp

 **Obelis S.A**
 Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium