

床用レジン

ご愛顧キャンペーン

キャンペーン期間 | 2024. 6/3 [MON] ▶ 7/19 [FRI]

ベシス

管理医療機器
医療機器認証番号
220AFBZX00120000

義歯床用アクリル系レジン



【特徴】

- 強度、耐候性に優れた加熱重合タイプの床用レジンです。
- 重合発熱による気泡の発生が無く、硬化時の収縮が小さい為、適合の良い美しい義歯を作製することができます。

【標準価格】

粉末: 1kg (床用フィルム入) ~~5,200円~~ → **特別価格**

3kg (床用フィルム入) ~~13,000円~~ → **特別価格** (※④、⑥のみ)

液体: 1ℓ (スポイト付) ~~3,200円~~ → **特別価格**

ベシス HI

管理医療機器
医療機器認証番号
221AFBZX00021000

義歯床用アクリル系レジン



【特徴】

- 一般的な義歯床用レジンより衝撃に強い為、床の厚みを薄くすることができます。
- 粉・液がなじみやすいので、義歯に気泡が入りにくいです。
- 粉末粒子が細かい為、義歯の表面が滑沢になります。

【標準価格】

粉末: 1kg (床用フィルム入) ~~6,200円~~ → **特別価格**


※液体はベシスと共用になります。

ベシス ツインキュア

管理医療機器
医療機器認証番号
222AFBZX00003000

義歯床用アクリル系レジン

ヒートショック・マイクロ波重合共用型

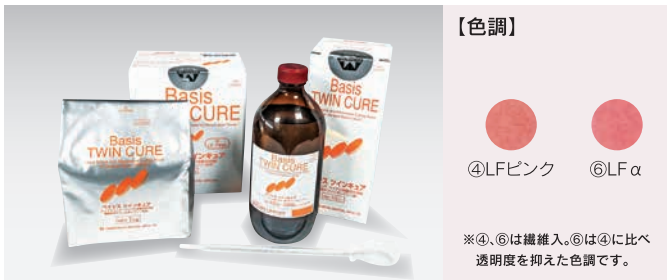

【特徴】

- 義歯床の肉厚部分に発生し易かった気泡が大幅低減。
- 耐変色性・適合性等物的に良好です。
- ヒートショック・マイクロ波重合方法のどちらでもご使用になれます。

【使用方法】

- ヒートショック フラスコを沸騰水中で15分間浸せします。
- マイクロ波重合 フラスコをマイクロ波発生装置(電子レンジ)に入れ500Wで、3分加熱。金属床の場合はフラスコを回転させて両面を重合して下さい。

【標準価格】

粉末: 1kg (床用フィルム入) ~~6,200円~~ → **特別価格**


液体: 500ml (スポイト付) ~~2,700円~~ → **特別価格**

ベシス フローII

管理医療機器
医療機器認証番号
306AFBZX00002000

義歯床用アクリル系レジン

注入型多目的アクリル系レジン

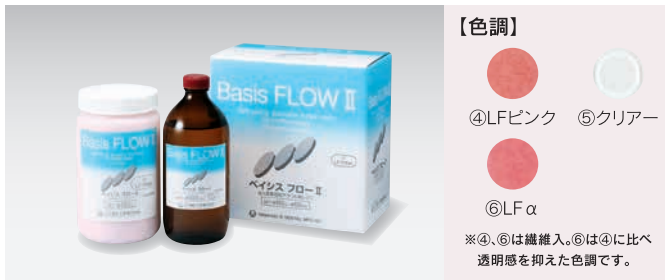

耐衝撃性・操作性・審美性が従来よりアップ!!
より強く、より使いやすくなりました。

【用途】

- 一般義歯及び、コーヌスタンチャー等のアタッチメント義歯の製作

【特徴】

- 長い操作余裕時間 粉液練和20秒 脱泡10秒
流し込み2分30秒以内 加圧重合30~60分

セット: 粉650g、液500ml ~~11,000円~~ → **特別価格**

粉末: 500g (アルミバック) ~~5,300円~~ → **特別価格**

液体: 500ml (スポイト付) ~~3,800円~~ → **特別価格**





MPパウダー & MPバフ ご愛顧キャンペーン

キャンペーン期間

2024 6/3 MON
7/19 FRI

数量限定

キャンペーン
期間中は
特別価格
にてご提供!!

MPパウダー 1kg → 特別価格
通常定価3,300円

MPパウダー 3kg → 特別価格
通常定価9,400円

MPバフ → 特別価格
通常定価1,100円

※MPパウダー7kg/缶はキャンペーン対象外となります。

ペーパーコーン・シリコンポイントはもういらない。

研磨作業時間 $\frac{1}{3}$ に短縮

専用バフ〈MPバフ〉との併用により、バリ取り修正後、艶出し手前までMPパウダーだけで研磨OK

ホコリが出ない

歯頸部に
研磨材が残らない

硬質レジン・パラジウム
合金の研磨もOK

MPパウダー

歯科用研磨器材

医療機器届出番号 23B1X10001C09006

包装	1kg/袋
	1kg×3/箱



一般医療機器



MPバフは、通例に従いドレッサーなどで毛羽立たせた状態にしてください。



MPパウダーは、通例に従い泥状にして下準備をします。

MPバフ

歯科用研磨器材

医療機器届出番号 23B1X10001C09010

MPバフを併用することにより
研磨能力が向上します。

包装	1個入/袋 φ90×7mm
----	------------------



一般医療機器



埋没材から掘出したデンチャーのバリ取りを行い、MPパウダーで研磨作業を開始します。人工歯が配列してある際には、研磨しすぎにご注意ください。



バフ掛けを行って作業完了です。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

<https://yamahachi-dental.co.jp/>

5303

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp