

## バキュームアダプター1型 ヒューズ交換方法

### 症状

○電源が入らない（メインスイッチのランプがつかない、吸引しない）

### 考えられるご対応

- 電源ヒューズが断線している可能性がございます。
- 本体背面電源コード部のヒューズ交換をお願いします。

### ～交換方法～

#### 画像①

電源コードを本体より抜いてください。

接続口部にでっぱりがあります。

マイナスドライバーなどを突起部にひっかけてヒューズボックスを手前に押し出してください。

#### 画像②


本体側のヒューズ①が断線している可能性がございます。

予備ヒューズ②（画像手前）と交換をして電源を入れなおしてください。


\*予備ヒューズは製品に1本付属しております。

\*予備ヒューズは単品販売しております。

画像①

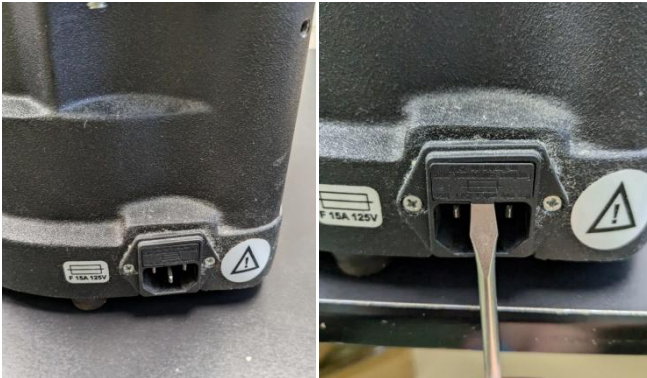

画像②

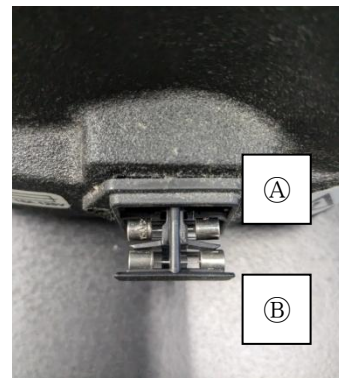

上記対応にて改善が見られない場合はお手数ですが弊社までご連絡を願ひ致します。

山八歯材工業(株) 0533-57-7121

\*修理、御見積につきましてはご購入先ディーラー様経由となります。

お手数をおかけしますがご対応の程何卒宜しくお願ひ申し上げます。